

CZYTAK PLUS – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czytaker jest niewielkim urządzeniem zrobionym na wzór telefonu komórkowego, prostym w obsłudze, umożliwiającym słuchanie książek. Jest przeznaczony dla czytelników którzy mają dysfunkcję wzroku i nie są w stanie sami czytać książek.

Czytaker włączamy/wyłączamy przytrzymując włącznik/wyłącznik około jednej sekundy. Włączenie jest sygnalizowane jednym krótkim sygnałem dźwiękowym. Wyłączenie jest sygnalizowane podwójnym sygnałem dźwiękowym. Klawisz REC włącza nagrywanie notatki głosowej jednocześnie zapalając czerwoną diodę a ponowne jego naciśnięcie spowoduje zatrzymanie nagrywania i zgaśnięcie diody.

DZIAŁANIE KLAWISZY CZYTAKA:

Klawisz 1	Zmiana trybu pracy (moduły „Czytaker”, „teksty”, „audio”, „daisy”, „dyktafon”, „radio”), po wciśnięciu tego klawisza Czytaker mówi, w jakim jest trybie,
Klawisz 2	włączanie i wyłączanie odtwarzania książek oraz notatek,
Klawisz 4	przechodzenie do poprzedniego odcinka książki lub poprzedniej notatki,
Klawisz 6	przechodzenie do następnego odcinka książki lub następnej notatki,
Klawisz 7	zmiana książki na poprzednią, wybór pamięci wewnętrznej w dyktafonie,
Klawisz 9	zmiana książki na następną, wybór karty pamięci w dyktafonie,
Klawisz 5	głośniej,
Klawisz 8	ciszej,
Klawisz 0	informacje o słuchanej książce,
Klawisz *0	„Odtwarzanie ciągłe” lub „Zatrzymaj pomiędzy odcinkami”.

NAGRYWANIE KSIĄŻEK NA CZYTAKA:

1. Czytaker włączy się automatycznie po podłączeniu do komputera.
2. Po podłączeniu do komputera przez kabel USB należy wcisnąć *13 (gwiazdka, a następnie klawisze 1 i 3). Usłyszymy komunikat: „Czy udostępnić kartę? 1) Tak, 2) Nie”.
3. Wciskamy klawisz 1 i karta pamięci Czytaka pojawia się na komputerze, jako dysk wymienny.
4. Możemy wówczas nagrać książki. Najlepiej jest najpierw usunąć wszystko, co jest na karcie pamięci zaznaczając (control + A) i usunąć klawiszem Delete.
5. W nowym oknie otwieramy zawartość płyty DVD.
6. Wchodzimy do katalogu wybranej książki i zaznaczamy 3 pliki z numerkami.
7. Kopiujemy pliki za pomocą myszki lub klawiatury (Control + c)
8. Przechodzimy do karty pamięci i wklejamy pliki za pomocą myszki lub klawiatury (control + v).
9. Każda książka składa się z 3 plików. Jeśli skopiujemy 3 książki, na karcie pamięci Czytaka powinno znajdować się 9 plików.
10. Na końcu najlepiej bezpiecznie usunąć kartę za pomocą „kłódki” na dolnym pasku komputera.
11. Jeśli czytaker jest włączony, to należy go wyłączyć i ponownie włączyć. Wówczas po przejściu klawiszem 1 do modułu „Czytaker” będziemy mogli klawiszami 7 i 9 przejrzeć dostępne książki.